


Se você conseguir imaginá-lo

Você conseguirá realizá-lo

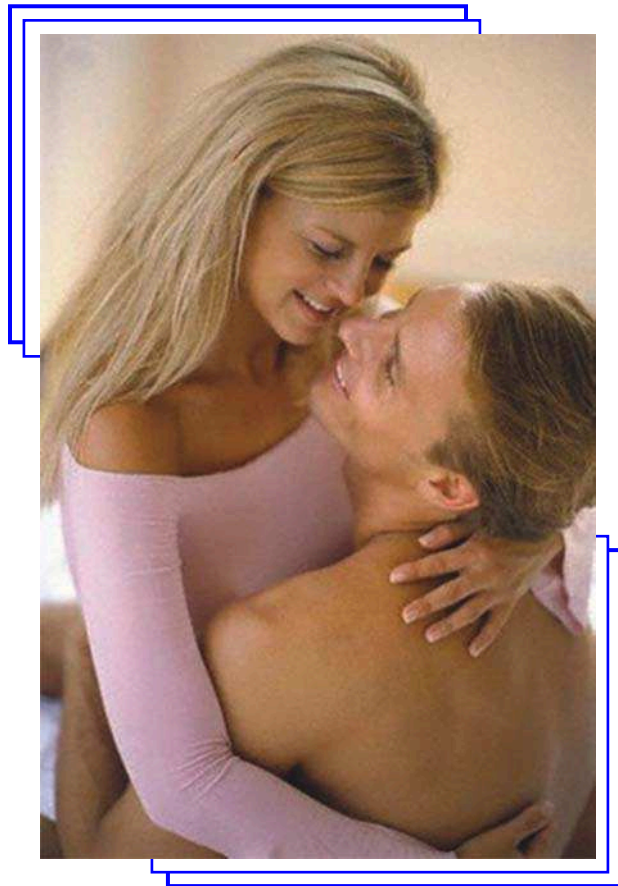

**VIBRADOR FERTI CARE® *peçoal***

Agora há um vibrador de pênis para ajudar a ejacular aos homens com lesão da medula espinal.

## **Grande satisfação sexual para homens com lesão da medula espinal**

Até recentemente, o único método satisfatório para ejacular, desenhado para homens com lesão da medula espinal, geralmente envolvia tratamentos clínicos. O Ferti Care® *Pessoal* oferece uma melhor abordagem, permitindo que os homens adquiram a ejaculação na privacidade de seus próprios lares, quando assim o escolhessem.

Ferti Care® *Pessoal* foi desenvolvido pela Multicept, em colaboração com especialistas do Rigshospitalet (Hospital da Universidade de Copenhague – Dinamarca) para tirar a sexualidade humana do controle dos hospitais e colocá-la com o indivíduo, a quem pertence.

Este vibrador manual trabalha usando uma técnica simples, conhecida como estimulação vibratória. É fácil, e por cima de tudo, é segura de usar (registrada na FDA)

## **Recuperação do sêmen pela estimulação vibratória do pênis**

A incapacidade de ejacular é a primeira causa de infertilidade nos homens com lesão da medula espinal (SCI). Para induzir à ejaculação pela estimulação vibratória do pênis (PVS), é necessário um arco reflexo ejaculatório intacto para poder fornecer uma transmissão de estímulos aferentes desde o pênis até o sacro lombar e os segmentos da medula espinal torácica baixa, e estímulos aferentes desde estes segmentos, até os órgãos ejaculatórios.

Os segmentos da medula espinal acima mencionados responderão, quando isolados do cérebro, aos estímulos do PVS.

Além da disfunção ejaculatória, geralmente a qualidade débil do sêmen é um outro obstáculo para os homens que sofrem SCI e que desejam ter filhos.

Aliás, a PVS combinada com as técnicas reprodutivas hoje existentes, melhoram a capacidade reprodutiva dos homens que sofrem do SCI e de suas parceiras.

## **Ferti Care® *personal* – sua nova opção**

Determinados parâmetros de vibração foram crucialmente testados para induzir a ejaculação por PVS em homens com SCI. Com a adequada força de vibração, PVS tem sido satisfatoriamente provada em mais de 80% em homens com SCI e com lesões acima de T10 - nível de medula espinal -. Desenhado segundo as especificações dadas por especialistas de avançada, o Ferti Care® *Pessoal* proporciona a energia necessária e a precisão requerida.

Ferti Care® *Pessoal* está registrado junto a FDA (Food and Drug Administration USA) e foi patenteado junto ao CE segundo as diretivas requeridas.

## **Uma aproximação não invasiva para a recuperação do sêmen**

A PVS é uma técnica não invasiva em oposição a eletro-ejaculação, a qual pode requerer de anestesia geral. Estudos recentes mostraram que a estimulação vibratória do pênis (PVS) aumenta muito as chances de ajudar com a doença da medula espinal (SCI) em homens com disfunção ejaculatória. Além do mais, o uso do método é também apropriado para homens sem paralisia e que sofram de ausência de ejaculação.

## **Ferti Care® *Pessoal* proporciona novas esperanças**

A estimulação vibratória do pênis não é um sistema novo. O que há de novo é a determinação dos parâmetros de vibração necessários para a indução satisfatória da ejaculação na maioria dos homens com SCI.

O Ferti Care® *Pessoal* apresenta parâmetros de vibração ajustáveis e, é fácil de operar.

O desenho ergonômico do vibrador combinado com a leveza do aparelho facilitam o uso para os homens, que além de SCI, apresentam também problemas de mau funcionamento das mãos.

## **Antes da aplicação da estimulação vibratória do pênis**

A disreflexia automática é um aumento rápido na pressão sanguínea devido à excessiva ativação do sistema nervoso autônomo, em homens com lesões acima de T9, em níveis da medula espinal, e pode ser causada por vários fatores incluindo, por exemplo, a PVS. A disreflexia autônoma é facilmente prevenida, na maioria dos casos, pelo nifedipino (um bloqueador do canal de cálcio).

Administrando de 10 – 20 mg de forma sublingual, de 10 – 15 minutos antes de iniciar a vibração.

## **Como pedir o Ferti Care® *Pessoal***

Ferti Care® *Pessoal* está disponível por receita médica, por isso, fale com seu médico. Ele deverá completar o formulário a seguir. Ele serve como receita, assim que leve o formulário com você quando for visitar seu médico.

Uma vez que o médico completar o formulário, você poderá enviá-lo ou bem, você poderá enviar a prescrição assinada por seu médico, acompanhada do pagamento a Orion Medical Group.

Nos empacotaremos o produto de forma discreta e o enviaremos por UPS. O tempo aproximado de entrega é de 5 a 7 dias após da recepção do seu pedido.

## Formulário de pedido do Ferti Care® *Pessoal*

Informação do paciente (favor imprimir)

---

Nome do Paciente

---

Endereço

---

Cidade

Estado

CEP

---

Telefone

Data de Nascimento

Como soube do Ferti Care® *Pessoal*

---

Informações do médico que prescreve (favor imprimir)

---

Diagnóstico primário do paciente

---

Endereço

---

Cidade

Estado

CEP

---

Telefone

---

Nº de matrícula

---

Especialidade médica

Eu receito e requero o Ferti Care® *Pessoal* vibrador para meu paciente acima mencionado porque o Ferti Care® *Pessoal* vibrador é clinicamente necessário.

---

Assinatura do médico

Data

Ferti Care® *Pessoal* possui uma garantia de 12 meses a partir da data da compra.

## **Ferti Care® *peessoal***

### **Porque o milagre da vida não precisa mais de um milagre?**

80% dos homens com a síndrome de SCI podem conseguir a ejaculação na privacidade dos seus próprios lares.

**Ferti Care® *peessoal*** melhora as chances de procriar nos homens que sofrem de lesão da medula espinal (SCI). E as melhora sem tirar a necessidade humana de privacidade e intimidade; porque pode ser feito em casa. Com o **Ferti Care® *peessoal***, você poderá arrumar um tempo especial para você e a sua parceira , e deste modo satisfazer sua necessidade de ficarem juntos na intimidade. Existem outras técnicas disponíveis, mas elas devem ser realizadas em clinicas e geralmente são tratamentos caros. Se ter filhos ou desfrutar da intimidade são prioridades para você, então considere o **Ferti Care® *peessoal***.

- **Funciona com baterias**

**Ferti Care® *peessoal*** vem com uma bateria interna recarregável. Não leva cordas ou fios. Para maior segurança, uma luz indicadora no vibrador lhe indicará se você estiver aplicando demasiada pressão.

- **Níveis de vibração ajustáveis**

Depois de muitas pesquisas foi descoberto, que um certo nível de intensidade otimiza o sucesso da ejaculação num 80% dos homens testados e que tinham a síndrome de SCI. Este nível é o que nos recomendamos, porém, como cada homem é um caso em particular, o **Ferti Care® *peessoal*** tem níveis de vibração ajustáveis. Escolha o ajuste que seja melhor para você .


- **Registrado na FDA e patenteado na CE**

**Ferti Care® *peessoal*** está registrado na American Food and Drug Administration (FDA) e patenteado de conformidade com a MDD – diretiva (93/42/EC)

- **Como funciona**

**Ferti Care® *peessoal*** manual trabalha usando a vibração para estimular o pênis. É fácil de usar na privacidade de sua própria casa.

## Instruções de uso Homens com Paralise

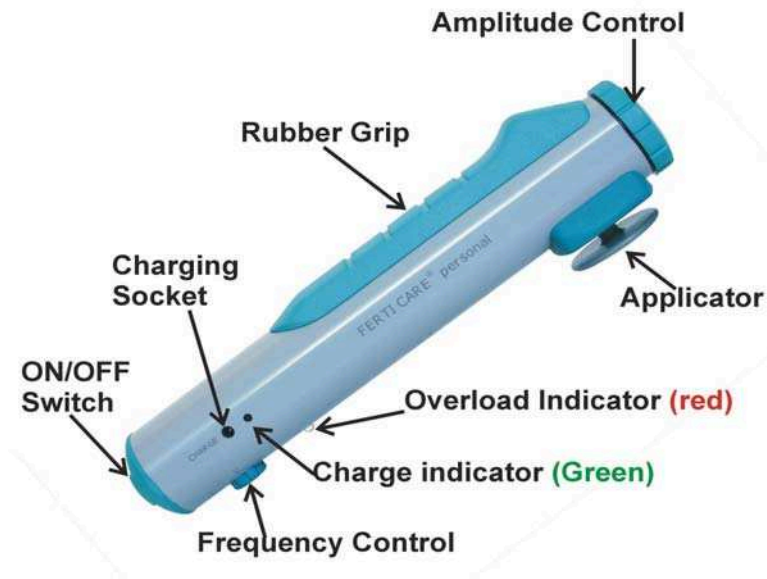

### Precaução

Se a sua lesão for acima do nível T6 da medula espinal, você deverá seguir cuidadosamente as instruções de seu médico a fim de prevenir-se da disreflexia autônoma.

É recomendável que sejam realizadas pelo menos duas aplicações do vibrador no consultório médico, antes de usar o Ferti Care® *personal* em casa.

Recomendamos o seguinte ajuste inicial:

Frequência: 100 HZ  
Amplitude: 2.5 mm

Coloque-se em uma posição bem confortável; pode ser sentado ou deitado, antes de ligar o Ferti Care® *personal*.

Coloque o aplicador no seu pênis como indicam as figuras abaixo e aplique uma pressão suave mas firme.

Aplique a vibração por um máximo de três minutos, caso a ejaculação ocorrer antes do tempo, o vibrador deverá ser desligado.

Se a ejaculação não ocorrer durante os primeiros 3 minutos, a vibração deverá ser continuada, com uma pausa de 1 minuto.

Este procedimento pode ser repetido por um máximo de 6 vezes. A condição necessária e a não ocorrência de um episódio de disreflexia autonômica e dependerá também, das condições superficiais da pele do pênis.

Para a obtenção da pressão recomendada, quando estiver usando o vibrador a uma frequência de 100 Hz e com uma amplitude de 2.5 mm, aplique pressão até que apareça a luz vermelha de advertência . Baixe a pressão até que a luz vermelha fique desligada.


Se você continuar aplicando maior pressão do que a recomendada para obter o resultado desejado, a luz indicadora do excesso, continuará ligada.

Se você aplicar pressão continuamente ou aumentar a pressão aplicada, provocando que a luz de excesso fique ligada, a vibração diminuirá até um nível menor do que o indicado.

estimulação vibratória do pênis não deverá ser realizada mais de uma vez a cada 24 horas. Em alguns casos, recomenda-se realizar a estimulação uma única vez por semana para evitar a exaustão do reflexo ejaculatório. Consulte com seu médico a frequência de vibrações que melhor se adaptar a você.

Se você tiver dificuldades em ejacular aos níveis indicados, você poderá experimentar com outro nível de ajuste.

Se a finalidade de induzir à ejaculação é engravidar a sua parceira, a ejaculação deverá ser colhida em um container livre de espermicidas (container desenhado especialmente para a colheita do esperma).

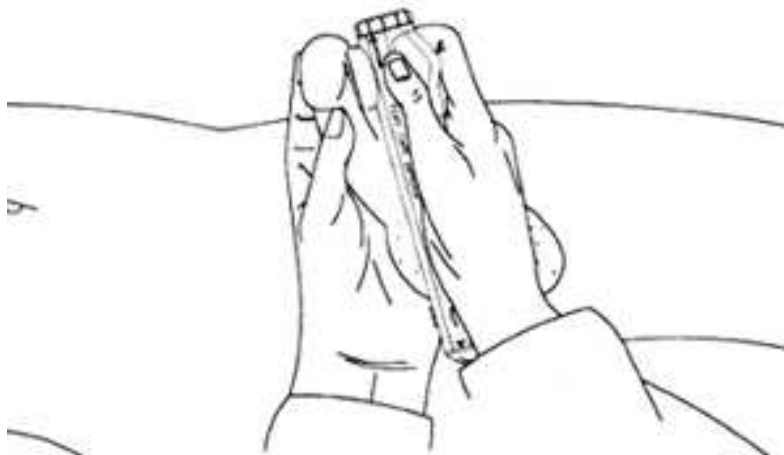

## FERTICARE

### FAQ

#### **Perguntas mais freqüentes**

Dado que a estimulação vibratória peniana é uma nova técnica, as pessoas estão naturalmente curiosas de aprenderem mais sobre este tema.

A seguir, lhe enviamos uma lista das respostas ás perguntas mais freqüentes.

#### **Seu envolvimento**

Se você tiver comentários, perguntas , recomendações ou material referente a este tema; e você quiser vê-lo publicado em nosso site de internet, ou se você estiver interessado em compartilhar suas experiências ou seus pontos de vistas conosco, por favor envie-nos um correio eletrônico ao seguinte endereço: [info@medicalvibrator.com](mailto:info@medicalvibrator.com)

#### **Infertilidade**

1- Quais são as principais causas de infertilidade em homens com lesão da medula espinal?

As principais causas de infertilidade são a disfunção ejaculatória e o espermatozoides de qualidade pobre.

#### **Disfunção ejaculatória:**

1. É possível o restabelecimento da função ejaculatória ?

Menos do 10 % de todos os homens com lesão da medula espinal, são capazes de obter a ejaculação durante o ato sexual ou através da masturbação.

Com a estimulação vibratória peniana é possível induzir a ejaculação na maioria dos casos em homens com lesão da medula espinal.

2. Que tipo de equipamento vibrador deve ser usado?

Para obter o resultado desejado (ejaculação) é requerido um aparelho vibrador com uma freqüência e uma amplitude adequada , como a que foi determinada pelos estudos e reportes nos jornais médicos.

Ferti Care® Pessoal é o único vibrador medicinal disponível, especificamente desenvolvido com a saída de energia necessária para induzir à ejaculação em homens com lesão da medula espinal.

A exclusiva vantagem da estimulação vibratória peniana é que pode ser usada na privacidade de sua casa ao contrario do que ocorre com os outros métodos.

3. O que acontece com a sensação dos orgasmos?



Em homens com lesão da medula espinal completa , não pode ser apreciada nenhuma sensação de orgasmo, embora os sucessos na ejaculação sejam freqüentemente seguidos do relaxamento das partes do corpo, por baixo do nível de lesão.

- Qualidade do sêmen

1. Quão pobre é a qualidade do sêmen?

Em geral, a qualidade do sêmen é pobre devido ao decrescimento da mobilidade (movimentos) do esperma em comparação com os padrões obtidos em laboratório (níveis médios) em homens sem lesão da medula espinal.

Conseqüentemente, a procriação natural pode ser difícil ou ainda impossível.

2. A qualidade do sêmen , pode se deteriorar ainda mais com o tempo?

Não, todos os dados científicos não mostram relação entre a qualidade do sêmen e o transcurso do tempo desde a ocorrência da lesão. É bem sabido que os homens com lesão da medula espinal tem maiores riscos de contraírem infecções do trato urinário do que aqueles sem lesão da medula espinal. Conseqüentemente, a percentagem de infecções no epidídimo e nos testículos, é relativamente alta em homens com lesão da medula espinal e poderia causar maiores danos no esperma, assim como na espermatogênese. Por isso, a criopreservação do sêmen ao começarem os sintomas de lesão da medula espinal, é recomendável.

3. É possível melhorar a qualidade do sêmen?

Até hoje, dois estudos demonstraram alguma melhora na qualidade do sêmen depois de repetidas ejaculações (pelo menos uma vez por semana) usando a estimulação vibratória peniana.

Um outro estudo recente, não demonstrou melhoras no sêmen depois de repetidas ejaculações vibratórias.

4. É possível obter uma gravidez natural em casa?

Sim, mais de 50 casos de gravidez envolvendo homens com SCI foram reportados na literatura médica. Todas elas foram conseguidas seguindo a estimulação vibratória peniana e a inseminação vaginal.

## 5.. Existem outras formas de engravidar?

Em vários estudos recentes ficou demonstrado que a percentagem de gravidez por ciclo de tratamento em casais com lesão de medula espinal, poderia se aproximar ao 25% quando forem usadas técnicas de reprodução assistidas.

Fazendo um paralelo, a percentagem de gravidez por ciclo durante a procriação natural em casais saudáveis e férteis com desejos de engravidar, é de 25-30 %

Quando estiver considerando o uso ou se já estiver usando o Ferti Care® *Pessoal*

### 1. Como posso começar um programa com a estimulação vibratória peniana?

Em alguns países é necessária uma prescrição médica, em outros não.

Mesmo assim, é recomendável que você contate o seu médico antes de usar o Ferti Care® *personal*

Você também poderá contatar nosso distribuidor local ou o time da Multicept em [info@medicalvibrator.com](mailto:info@medicalvibrator.com) para maiores informações.

### 2. Quais são os efeitos adversos ?

Há poucos efeitos adversos potenciais, por isso é que nos recomendamos sempre consultar com seu médico antes de começar a usar o FERTI CARE® *personal*.

#### ***Pele inchada ou inflamada***

FERTI CARE® *personal* não deverá ser usado acima da pele inchada ou inflamada ou acima de erupções cutâneas.

A estimulação vibratória poderia causar um trauma superficial resultando em ardor, sangrado ou ulceração superficial. Se ocorrer quaisquer destes sintomas, não utilizar a estimulação e consultar com seu médico.

#### ***Disreflexia autonômica***

A disreflexia autonômica, usualmente registrada como uma repentina e intensa dor de cabeça, é um aumento rápido da pressão sanguínea devido a uma excessiva ativação do sistema nervoso autonômico. Se a sua lesão de medula espinal for superior ao nível T6, seu corpo deve ter perdido a habilidade de controlar a pressão de forma automática.

A disreflexia autonômica poderia ser causada por vários fatores, como por exemplo, uma excessiva dilatação do ventre ou da bexiga. Este procedimento envolve a ejaculação, incluindo a estimulação vibratória peniana, e poderia precipitar um episódio agudo de disreflexia autonômica.

Se sua lesão da medula espinal for maior de T6, você deveria obter as instruções do seu médico antes de iniciar a estimulação vibratória peniana, tendo em conta a possibilidade do desenvolvimento de disreflexia autonômica, suas conseqüências potenciais e o tratamento em resposta aos possíveis sintomas, e também como profilaxia preventiva.

- Se você corre o risco de sofrer de disreflexia autonômica, recomenda-se o uso de *nifedipino* (um bloqueador do canal de cálcio)

Administrando de 10 – 20 mg de forma sublingual, de 10 – 15 minutos antes de iniciar a vibração. Em caso de ejaculação, a vibração deve ser detida.

Você poderá encontrar mais informação sob a disreflexia autonômica em: [www.ova.org](http://www.ova.org).

#### 1. Como devo limpar o FERTI CARE® *peessoal* ?

Solo para uso pessoal: para limpar seu aparelho, tire o aplicador removível do vibrador e lave com água morna e sabão. Poderá passar um pano úmido com álcool nas partes externas do aparelho. O aparelho não deve ser submerso em nenhum líquido.

#### 2. Quantas vezes posso usar o FERTI CARE® *peessoal* ?

Você pode usar o vibrador até a ocorrência da ejaculação ou como máximo por 3 minutos seguidos por uma pausa de um minuto. O procedimento poderá ser repetido até 6 vezes, se não houver ocorrência de disreflexia autonômica e dependendo das condições da pele superficial peniana.

Não deverá ser realizada a estimulação peniana mais de uma vez a cada 24 horas. Em alguns casos, é recomendável realizar a vibração apenas uma vez por semana para evitar a exaustão do reflexo ejaculatório.

Deixe que seu médico decida a melhor opção para você.